

GYÓGYÍTÓ BARÁTOK SZEMPÁRNA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Használat felmelegítve

A Gyógyító barátok sópárna illetve lenmag töltetet 50-60 °C-os sütőben 25-30 percig melegítsd fel a kívánt hőmérsékletre! Ezután tedd vissza a bárányba vagy a maciba.

Használat lehűtve

A sópárna illetve a lenmag töltetet 25-30 percre tedd a fagyasztóba, majd helyezd a problémás testrészre.

Tisztítás

A Gyógyító barátok huzat kézmeleg, kb. 30 °C-os vízben, kézzel gyengéden mosható! Szennyeződés esetén dörzsölés nélkül, áztasd be pár percre. A felesleges vizet törölközőbe behajtva, finoman, nyomkodva itasd le róla és szárítsd meg. A Gyógyító barátok töltetei nem moshatóak, ezért mielőtt a huzatot kimosnád, vedd ki belőlük. A sópárna és a lenmag töltet ne érintkezzen vízzel, mert a só a vízben feloldódik a lenmag pedig víz hatására zselés anyaggá változik.

Ajánlott életkor: újszülött kortól

Fontos figyelmeztetés!

A só és lenmagpárnát mikrohullámú sütőben TILOS használni, mert a töltet elég lehet! Az előírt melegítési hőfokot (50-60 °C) és időtartamot (25-30 perc) ne lépd túl! A felmelegítés során ne hagyd őrizetlenül a párna tölteteket a sütőben. A túl meleg só illetve lenmagpárna sérülést okozhat! Mindig ellenőrizd a hőmérsékletét, mielőtt a meztelen bőrfelületre tennéd!

FIGYELEM! Terápiás termék, nem gyermekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Ne hagyd a gyermeket felügyelet nélkül a termékkel! Alkalmazása előtt kérd ki az orvos tanácsát!

Javítási lehetőségek

Ha a Gyógyító barátok szempárna huzata olyan szennyeződést kapott, amit nem sikerült maradéktalanul kitisztítani, kérlek, keress meg bízalommal. Közös megbeszéljük, hogyan tudunk segíteni.

Ha a Gyógyító barátok huzata megsérült

- 1 éven belül jelentkező probléma esetén a javítás általában megoldható. Ebben az esetben a játékot visszaküldheted nekünk és mi ingyenesen megjavítjuk.
- 1 éven túl bejelentett hibák javítását nem minden esetben tudjuk vállalni, de mindenképp érdemes egyeztetni, mert lehet, hogy találunk rá megoldást.

A javításra visszaküldött termékek oda- és visszaszállításának költsége a vásárlót terheli, amennyiben nem gyártási hiba okozta a sérülést.